

Xailin HA

Sodyum Hyalüronat %0,2
Göz Damlası, 10 ml
GÖZDE PREZERVANSIZ

Kullanım Kılavuzu

Xailin HA Göz Damlasını kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu talimatta sunulan bilgi ürün hakkındaki önemli noktaları özetlemektedir. Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Xailin HA nedir?

Xailin HA orta-şiddetli derecede kuru göz semptomlarını azaltmak için kullanılan çok dozlu kayganlaştırıcı bir göz damlasıdır. Ambalaj, 10 ml steril izotonik göz damlası içerir.

Bileşimi:

Xailin HA göz damlası sulu tamponlanmış taşıyıcı içinde sodyum hyalüronat %0,2 ve sodyum perborat içerir. Xailin HA, bakteriyel fermentasyonla oluşturulmuş hyalüronik asit sodyum tuzunun yüksek derecede saflaştırılmış spesifik bir fraksiyonunu içermektedir ve bu nedenle hayvansal proteinler içermemektedir. Hyalüronik asit doğal olarak oluşan, benzersiz viskoelastik ve higroskopik özellikleri olan biyouyumlu bir polisakkarittir. Gözde, hyalüronik asit vitreus, lakrimal bez, kornea epiteli, konjunktiva ve insan gözyaşı sıvısı içinde bulunur. Hyalüronik asit mukoadheziv özelliklere ve nem tutma yeteneğine sahiptir ve korneal stromada su dağılımını etkilediği bilinmektedir. Bu durum, hyalüronik asidin göz yüzeyini kaplama özelliği ile birlikte, prekorneal direnç zamanında ve gözyaşı tabakası kırılma zamanında bir artışa yol açar ve bu nedenle kornea yüzeyinde daha uzun bir kayganlaştırma sağlar. Hyalüronik asit günümüzde, kontakt lenslerin ıslatılabilirliğini ve konforunu artırmak için kontakt lens ürünlerine eklenmektedir. Xailin HA, gözünüze temas ettiğinde su ve oksijene dönüşerek ortadan kaybolan bir koruyucu içermektedir. Böylelikle, geleneksel koruyucuların neden olabileceği iritasyonu en aza indirirken aynı zamanda çok-dozlu form uygunluğu sağlamaktadır. Hissedilen sadece göz damlasının sağladığı rahatlamadır.

Ne zaman kullanılmalıdır?

Xailin HA belirli göz rahatsızlıklarında göz yüzeyini kayganlaştırmak ve korumak için kullanılır. Xailin HA, ağrı, iritasyon veya kumlanma hissi gibi kuru göz semptomlarında rahatlama sağlar. Kuru göz semptomları, normal gözyaşının kalitesinin kötü olduğu veya gözü nemli tutamayacak kadar az üretildiği çeşitli nedenlere bağlı oküler yüzey bozukluklarının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Xailin HA kontakt lenslerle birlikte kullanılabilir.

Kullanım şekli:


Genel kullanım, gereklikçe günde 2-4 kez bir veya iki damla uygulama şeklindedir; ancak bu ürünü kullanmanızı tavsiye eden hekiminiz farklı bir şekilde kullanmanızı söyleyebilir. Çocuklarda doz ayarlaması yapmak gerekli değildir. Yeni bir Xailin HA şişesini açmadan önce, lütfen şişe kapağının üzerindeki güvenlik halkasının sağlam olduğunu kontrol ediniz.


1. Güvenlik halkasını açmak için kapağı saat yönünün tersi yönde döndürünüz.
2. Kullanmadan önce ellerinizi iyice yıkayınız ve kurulayınız.
3. Kapağı çıkarınız.
4. Başınızı geriye doğru eğiniz ve yukarı doğru bakınız.
5. Alt göz kapağınızı yavaşça aşağı doğru çekerek göz kapağınız ve gözünüz arasında küçük bir cep oluşmasını sağlayınız.
6. Şişeyi diğer elinizin başparmağı ve orta parmağı arasında tutunuz ve işaret parmağınızla göz damlası şişesinin tabanına orta dereceli bir basınç uygulayarak bir damla Xailin HA Göz Damlasının cep içine damlamasını sağlayınız.


7. Gözünüzü birkaç kez kırınız.
8. Eğer damlayı göze damlatamadığınızı düşünüyorsanız, başka bir damla damlatınız.
9. Göz kapağı çevresindeki fazla Xailin HA Göz Damlasını bir mendille dikkatli bir şekilde siliniz.
10. Kapağı kapatınız, damlalığın ucunu gözünüz veya parmaklarınız dahil hiçbir şeye değdirmemeye çalışınız.
11. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.
12. Başka bir göz ilacı uygulamadan önce en az 30 dakika bekleyiniz.


Uyarılar ve önlemler:

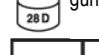
- Şişenin kapağı üzerindeki güvenlik halkası hasarlıysa kullanmayınız.
- Bu ürüne karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
- Damlalığın ucunu gözünüze veya başka bir yere değdirmeyiniz.
- Xailin HA'yı başka bir kişiyle paylaşmayınız.
- Xailin HA uygulandıktan sonra görmede minimal bulanıklığa neden olabilir. Taşıt veya makina kullanmaya başlamadan önce görmemiz netleşene kadar bekleyiniz.
- Kutu veya şişe üzerinde yazan son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
- 1°C ile 25°C arasındaki sıcaklıkta saklayınız.
- Xailin HA, şişenin ilk kez açılmasından 28 gün sonrasında kadar kullanılabilir.
- Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerde saklayınız.
- Sadece haricen göze uygulamak içindir, içmeyiniz.
- Hamileyseniz veya emziriyorsanız, Xailin HA kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Kullanılan şişeleri yerel atık yönetmeliklerine uygun olarak imha ediniz.


nicox  Nicox Pharma tarafından dağıtılmaktadır, CS10313, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, Fransa - nicoxpharma@nicox.com

 Medicom Healthcare Ltd., 235 Hunts Pond Road, Fareham, Hampshire, P014 4PJ, U.K.

 1°C ile 25°C arasında saklayınız

 Uyarı, kullanım kılavuzuna bakınız

 İlk kez açıldıktan 28 gün sonra atınız

 Kullanım kılavuzuna bakınız

STERILE A Aseptik işleme teknikleri kullanılarak sterilize edilmiştir

1.HDM/CPM17-27.AM14.DV1

İthalatçı: Liba Laboratuvarları A.Ş. Otağtepe Cad. No:5. 34810 Kavacık İstanbul

Üretici: Medicom Healthcare Ltd., 235 Hunts Pond Road, Fareham, Hampshire, P014 4PJ, İngiltere

Xailin, Nicox'un bir ticari markasıdır.

Metnin son revizyonu: Şubat 2014.

 0120