

HİPERTONİK OFTALMİK SOLÜSYON

Prezervansız

Sodyum Klorür %5

Hipertonik oftalmik solüsyon - prezervansız 10 ml şişe

Bileşimi:

Sodyum Klorür, sodyum edetat, sodyum hiyalüronat, borik asit, sodyum tetraborat, su.

Steril Hipertonik Oftalmik Solüsyon nedir?

Steril Hipertonik Oftalmik Solüsyon prezervansızdır ve yeni ve patentli OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) sistemli, çok-dozlu 10 ml'lik şişede verilir. OSD, potansiyel olarak zararlı bakterileri solüsyondan uzak tutar, böylelikle ilk kullanımından sonra 60 güne kadar steril kalır.

Steril Hipertonik Oftalmik Solüsyon ne zaman kullanılmalıdır?

STERİL HİPERTONİK OFTALMİK SOLÜSYON - korneal ödem belirtilerinin geçici olarak hafifletilmesinde endike bir hipertonik oftalmik solüsyondur.

Uygulama – Steril Hipertonik Oftalmik Solüsyon nasıl kullanılır?

İlk kullanımda, güvenlik halkasını çıkartın. Damlalığın ucunun kurumasını önlemek için şişe kapağını göze 1 damlayı damlatmadan hemen önce çıkartınız. Her kullanımdan sonra kapağı geri kapatın. Her 3-4 saatte bir veya doktorunuz tarafından reçete edildiği şekilde tekrarlayın. Şişenin ağzını temiz tutmak için damlaları günde en az bir kez kullanın.

Önlemler ve uyarılar

- İç ve/veya dış ambalajı zarar görmüşse kullanmayınız
- Ürünün içerdiği bileşiklerden herhangi birine duyarlıysanız kullanmayınız
- Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız
- Damlalığın ucunu göze deđdirmeyiniz
- Ürünün kullanımı yanma ve geçici iritasyona neden olabilir. Sorun devam ederse veya oküler iritasyon durumunda lütfen doktorunuza danışınız
- Herhangi bir diđer göz ilacını damlatmadan önce en az 10-15 dakika bekleyiniz
- Şişe açıldıktan sonra, ürün 60 gün içinde kullanılmalıdır
- Çocukların göremeyeceđi ve erişemeyeceđi yerlerde saklayınız
- Eđer yumuşak kontakt lens kullanıyorsanız, ürünü uygulamadan önce çıkarınız ve lensleri tekrar takmak için en az 15 dakika bekleyiniz.
- Kuarternern amonyum tuzlarının varlığında kullanmayınız
- Yutmayınız
- Bu ürün 30 günden uzun süreli kullanım için uygun deđildir; eđer belirtiler devam ederse doktorunuza danışınız.

Üretici:

NTC s.r.l. Via Luigi Razza 3 20124 Milan İtalya

İthalatçı:

Liba Laboratuvarları A.Ş. Otağtepe Cad. No:5. 34810 Kavacık İstanbul

CE0426

STERİLE A

Rev: Mart 2018